



Zugelassene Zubehörartikel für Mermaid

Muttermilch-Aufnahmeset

beldico ist Hersteller zugelassener Zubehörartikel für die Mermaid Milchpumpe zur Verwendung im Krankenhaus und zuhause.

Die Brustschutz sind passend zur individuellen Größe und Form der Brustwarzen und des Brustwarzenhofs in verschiedenen Größen erhältlich.

Alle Muttermilchaufnahmesets sind für jedes beldico Saugfläschchen geeignet. Alle Materialien zur Herstellung der Zubehörartikel, die in Kontakt mit der Muttermilch gelangen, sind von Lebensmittelqualität, latexfrei und BPA-/DEHP-frei.



Zur Verwendung im Krankenhaus

Die Muttermilchaufnahmesets zur Verwendung im Krankenhaus sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Sterile Milchaufnahmesets für die Intensivversorgung von Neugeborenen und für Säuglinge mit schweren Erkrankungen (mit ETO sterilisiert)
- Bakteriologisch reine Milchaufnahmesets für (Intensiv-)Stationen für Neugeborene und für Säuglinge mit schweren Erkrankungen (mit Gammastrahlen behandelt)
- Unsterile Milchaufnahmesets zur allgemeinen Verwendung im Krankenhaus/ während der Mutterschaft

Fahrgestell-Set

Ein zugelassenes Fahrgestell-Set mit Montageplatte sorgt für den sicheren und stabilen Transport der Mermaid Milchpumpe. Dieser Fahrgestell ist nur zur Verwendung im Krankenhaus bestimmt.

Die Muttermilch-Aufnahmesets enthalten ein Komplettsset aus

- Brustschutz (22, 24, 27, 30 oder 36 mm)
- Saugfläschche
- Ventil
- Balg
- 100-cm-Silikonschlauch



Wir sind Experten für Säuglingsernährungsprodukte


Zur häuslichen Verwendung

Die beldico Muttermilchaufnahmesets zur häuslichen Verwendung bestehen aus einem Komplettsset inklusive Brustschutz, 120-ml-Saugfläschchen, Ventil, Balg und 100-cm-Silikonschlauch. Diese Sets sind zugelassene Zubehörartikel für die Mermaid Milchpumpe.


Sie sind als unsteriles Einzelset oder als Doppelsset erhältlich. Balg und Schlauch sind auch nachbestellbar.


beldico ist ein führender Anbieter von Spezialernährungsvorrichtungen für Neugeborene. beldico ist ein Entwickler und Hersteller von Medizinprodukten für die Säuglingsernährung.

LIFE STARTS WITH US

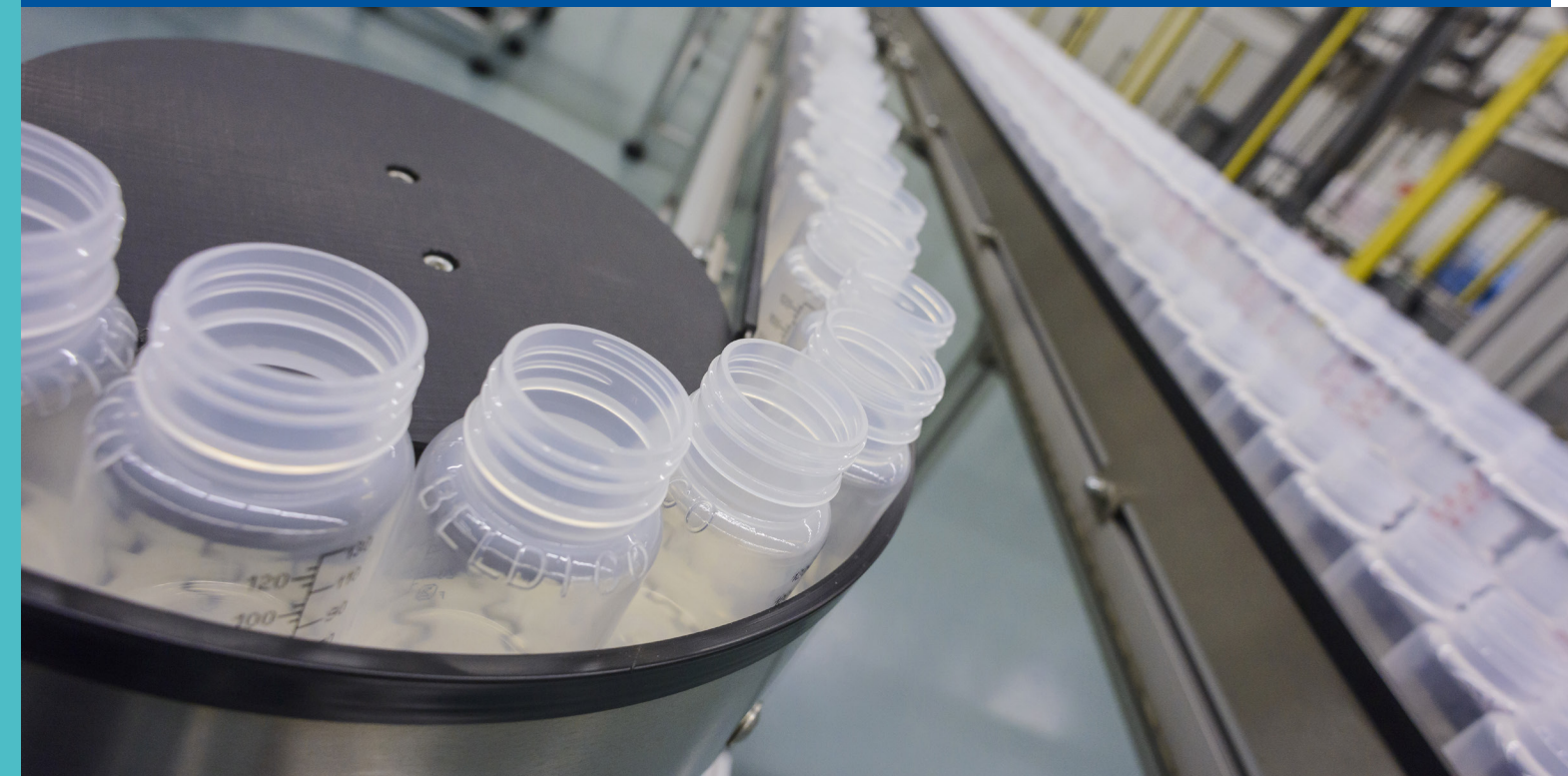

Vertrieb

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

 Vesucta ApS • Palle Juul-Jensens Boulevard 82 • DK-8200 Aarhus N (Dänemark)



BELDICO • Rue André Feher 3 • B-6900 Marche-en-Famenne (Belgien)
T. + 32 (0)84 31 37 80 • F. + 32 (0)84 31 37 87
www.beldico.com • info@beldico.be



Mermaid

Milchpumpe

LIFE STARTS WITH US

Mermaid

Milchpumpe

Wenn Sie stillen, unterstützen Sie das Wachstum und die Entwicklung Ihres Babys auf natürliche Weise. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, Babys in den ersten 6 Lebensmonaten ausschließlich zu stillen, um ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. **beldico** möchte mit seiner anwendungsfreundlichen Milchpumpe, der *Mermaid*, Müttern dabei helfen, ihre Babys optimal zu ernähren.



• Komfortable Muttermilch Aufnahme

Zur Simulation des natürlichen Stillvorgangs, und um mehr Milch in kürzerer Zeit abzupumpen, kommt bei der *Mermaid* Milchpumpe eine Zweiphasentechnologie zur Anwendung.

Die kontinuierlich anpassbare Zweiphasentechnologie besteht aus einer Stimulations- und einer Abpumpphase.

In der Stimulationsphase wird das schnelle und sanfte Saugen des Babys imitiert, das den Milchfluss anregt. Die effektive Abpumpphase imitiert das langsamere, intensivere Saugen des Babys zum effizienten Abpumpen der Muttermilch.

• Einfach zu verwenden

Das spezielle Muttermilchaufnahmeset lässt sich leicht und mühelos installieren, indem der Balg mit dem äußeren Kolben der *Mermaid* Milchpumpe verbunden wird. Darüber hinaus sind keine weiteren Vorbereitungsschritte notwendig.

Sobald das Gerät in Betrieb ist, beginnt das Abpumpen mit der Phase der vorsichtigen Stimulation, um den Milchfluss anzuregen. Anschließend schaltet die *Mermaid* Milchpumpe sanft von der Stimulations- in die Abpumpphase um.

Jede Mutter kann die Pumpeneinstellungen dem Saugverhalten ihres eigenen Kindes entsprechend individuell verändern. Die *Mermaid* verfügt sogar über unabhängige Steuervorrichtungen für jede Brust und sorgt somit für maximalen Komfort. Die gewählten Einstellungen sind auf der Digitalanzeige gut sichtbar.

Die Milchpumpe kann nach Belieben von der Mutter unterbrochen und wieder gestartet werden. Wird der Betrieb für mehr als 30 Minuten unterbrochen, schaltet sie sich automatisch aus. Nun können das oder die gefüllten Saugfläschchen problemlos von dem Muttermilchaufnahmeset abgeschraubt und weiterverwendet werden.

• Optimal hygienisch

Das revolutionäre Konzept der vollständigen Trennung zwischen Milchaufnahmeset und Milchpumpe garantiert optimale Hygienebedingungen, da nur Luft und Milch zwischen dem Balg und der Brust der Mutter strömen können.

Der durch lineare mechanische Bewegungen betriebene Balg dient als Pumpe und sorgt für das erforderliche Vakuum in der Abpumpvorrichtung.

Dieses System ist geschlossen und jederzeit komplett transparent, sodass der Luftstrom und die abgepumpte Muttermilch durch keinen Bestandteil des Systems kontaminiert werden können. Das Set kann auch nicht durch den Inhalt eines anderen Muttermilchaufnahmesets kreuzkontaminiert werden, das mit derselben Maschine verwendet wird.

• Leicht zu reinigen und zu pflegen

Mermaid Milchpumpe

Durch ihr spezielles, glattes Design ist die Oberfläche der *Mermaid* Milchpumpe sehr leicht zu reinigen.

Um die äußeren Teile der Milchpumpe sauber zu halten, sind die im Krankenhaus für allgemeine elektrische/elektronische Vorrichtungen üblichen Reinigungsverfahren ausreichend.

Es ist keine besondere Pflege der elektrischen Komponenten erforderlich.

Muttermilchaufnahmesets

Unsere sterilen und bakteriologisch reinen Muttermilchaufnahmesets zur einmaligen Verwendung sind für den Einmalgebrauch bestimmt und erfordern weder vor noch nach dem Gebrauch eine Reinigung.



• Geräuscharm

Aufgrund der patentierten Milchpumpentechnologie mit zwei Motoren arbeitet die *Mermaid* extrem geräuscharm. Es gibt keine vibrierenden Teile, die unangenehme Vibrationen oder störenden Lärm verursachen könnten.

• Kompakt und transportierbar

Die *Mermaid* Milchpumpe verfügt über ein kompaktes Design mit geringem Gewicht und kann zum sicheren und geschützten Transport im Krankenhaus auf einem Rollwagen montiert werden.

Die beiden integrierten Fläschchenhalterungen der *Mermaid* Milchpumpe ermöglichen es, die **beldico** Saugfläschchen senkrecht auf die Pumpe zu stellen, was den Platzbedarf reduziert.

• Praktisch und effizient

Die *Mermaid* Milchpumpe kann zum Abpumpen einer Brust oder beider Brüste verwendet werden. Das gleichzeitige Abpumpen beider Brüste verkürzt die Gesamtdauer des Abpumpens.

Beim Abpumpen beider Brüste findet gegenüber dem Abpumpen einer Brust kein Vakuumverlust statt, das heißt, die *Mermaid* Pumpentechnologie arbeitet sehr effizient.

Darüber hinaus ist die *Mermaid* Milchpumpe aufgrund der unabhängigen Einstellmöglichkeiten für jede Brust äußerst anwendungsfreundlich, und die in verschiedenen Größen erhältlichen Stillhütchen (22, 24, 27, 30 oder 36 mm) sorgen durch ihre gute Passform für mehr Komfort und besseren Milchfluss.



Produktcode	Beschreibung
5101272	<i>Mermaid</i> Milchpumpeneinheit mit Netzkabel, Gebrauchsanweisung und Kurzanleitung
5101484	Fahrgestell mit Montageplatte für die <i>Mermaid</i> Milchpumpe mit ABS-Fuß, Schwenkrädern, Kabelhaken und Höhenverstellbarer